

Koppeling Audio Service hoortoestellen met Android-telefoons



Telefoon

- 1. Zorg dat Bluetooth 🛠 aanstaat in uw telefoon (Instellingen 🔯 => Verbindingen => Bluetooth)
- 2. Start de hoortoestellen opnieuw op
 - a. Batterijversie: batterijlade openen en weer dicht doen
 - b. Oplaadbare versie: hoortoestellen 10 seconden op de oplader zetten en dan weer eraf halen (of eventueel de onderste knop van de toestellen 6 seconden ingedrukt houden voor uitschakelen, en daarna weer 6 seconden ingedrukt houden voor inschakelen)
- 3. Beide hoortoestellen verschijnen nu in het menu. Klik hierop en accepteer het koppelverzoek (eenmaal voor elk hoortoestel)

Audio Service App

- 1. Zoek de app in de *Playstore* Soogle Play => Audio Service App 🔮 en download deze
- 2. Open de betreffende app 🔇
- 3. Kies een verbindingsoptie: druk op Bluetooth \$
- 4. Start de hoortoestellen opnieuw op (zie punt 2 in het onderdeel Telefoon) en druk op OK
- 5. Wacht tot allebei de hoortoestellen zijn herkend door de app (L+R), en druk hier dan op
- 6. De hoortoestellen worden nu gekoppeld aan de app
- 7. Telecare-setup: Het is bij bepaalde hoortoestellen mogelijk de instellingen op afstand te veranderen ('vanuit de luie stoel' i.p.v. op afspraak bij de audicien). Indien dit beschikbaar is en u wenst dit te activeren, dan kunt u dat op dit moment instellen. U dient dan wel *binnen 3 dagen* contact op te nemen met de audicien voor een koppelingscode. Indien u dit niet wenst, dan drukt u op *Sla de telecare setup over*
- 8. De app is nu klaar voor gebruik

Herstellen koppeling

- 1. Ga in de app \bigcirc naar het menu (de 3 streepjes links bovenin \equiv)
- 2. Druk op Instellingen 💿 => App-instellingen => De app instellen
- 3. Bevestig dat u dit zeker weet. De app wordt nu gereset
- Ga op uw telefoon naar Instellingen
 Second state
 Second state
- 5. Druk op de hoortoestellen, en druk onderin op *Koppeling opheffen* (en bevestig dat u dit zeker weet)
- 6. Koppel nu de hoortoestellen opnieuw aan de telefoon volgens de beschrijving bij **Telefoon** hierboven
- 7. Volg nu de stappen in het onderdeel Audio Service App, vanaf stap 2

Geluid van een Nieuw Begin