

Koppeling Signia hoortoestellen met Android-telefoons



Telefoon

1. Zorg dat Bluetooth  aanstaat in uw telefoon (*Instellingen*  => *Verbindingen* => *Bluetooth*)
2. Start de hoortoestellen opnieuw op
 - a. Batterijversie: batterijlade openen en weer dicht doen
 - b. Oplaadbare versie: hoortoestellen 10 seconden op de oplader zetten en dan weer eraf halen (of eventueel de onderste knop van de toestellen 6 seconden ingedrukt houden voor uitschakelen en daarna weer 6 seconden ingedrukt houden voor inschakelen)
3. Beide hoortoestellen verschijnen nu in het menu. Klik hierop en accepteer het koppelverzoek (eenmaal voor elk hoortoestel)

Signia App

1. Zoek de app in de *Playstore*  *Google Play* => *Signia App*  en download deze
2. Open de betreffende app 
3. Kies een verbindingsoptie: druk op *Bluetooth* 
4. Start de hoortoestellen opnieuw op (zie punt 2 in het onderdeel **Telefoon**) en druk op **OK**
5. Wacht tot allebei de hoortoestellen zijn herkend door de app (L+R), en druk hier dan op
6. De hoortoestellen worden nu gekoppeld aan de app
7. Telecare-setup: Het is bij bepaalde hoortoestellen mogelijk de instellingen op afstand te veranderen ('vanuit de luie stoel' i.p.v. op afspraak bij de audicien). Indien dit beschikbaar is en u wenst dit te activeren, dan kunt u dat op dit moment instellen. U dient dan wel *binnen 3 dagen* contact op te nemen met de audicien voor een koppelingscode. Indien u dit niet wenst, dan drukt u op *Sla de telecare setup over*
8. De app  is nu klaar voor gebruik

Herstellen koppeling

1. Ga in de app  naar het menu (de 3 streepjes links bovenin ≡)
2. Druk op *Instellingen*  => *App-instellingen* => *De app instellen*
3. Bevestig dat u dit zeker weet. De app wordt nu gereset
4. Ga op uw telefoon naar *Instellingen*  => *Verbindingen* => *Bluetooth* 
5. Druk op de hoortoestellen, en druk onderin op *Koppeling opheffen* (en bevestig dat u dit zeker weet)
6. Koppel nu de hoortoestellen opnieuw aan de telefoon via het onderdeel **Telefoon**
7. Volg nu de stappen in het onderdeel **Signia App**, vanaf stap 2.

Gebruik de app

Meer informatie over wat u allemaal met de app kunt doen, vind u op www.signia.net/nl-nl/connectivity/signia-app/



Scan de QRcode en ga zo naar de website met uitleg over de Signia app.